



Опоры-ходунки с принадлежностями:

Опоры-ходунки:
арт. 10180, арт. 10180-W.

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Порядок работы.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10180, 10180-W. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Опоры-ходунки 10180, 10180-W, являются медицинским изделием, предназначенным для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.



10180



10180-W

Ходунки 10180 предназначены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оснащены ножками, регулируемые по высоте, дают возможность настроить высоту под рост пользователя без применения инструмента, позволяя минимизировать нагрузки на позвоночник и суставы. Безопасность пользователя гарантируют противоскользящие накладки на поручнях и ножках. Складная конструкция с помощью удобных ручек на опорах и легкий, но прочный алюминиевый каркас делают изделие удобным для хранения и транспортировки.

Ходунки 10180-W оснащены передними цельнолитыми колесами на опорных ножках. Ножки, регулируемые по высоте, дают возможность настроить высоту под рост пользователя без применения инструмента, позволяя минимизировать нагрузки на позвоночник и суставы. Безопасность пользователя гарантируют противоскользящие накладки на поручнях и ножках. Складная конструкция с помощью удобных ручек на опорах и легкий, но прочный алюминиевый каркас делают изделие удобным для хранения и транспортировки.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	10180	10180-W
Материал	Алюминий	Алюминий
Рама	Складная	Складная
Тип конструкции	Фиксированный	Фиксированный
Расстояние между поручнями	46 см	46 см
Регулировка по высоте	80-95 см	80-95 см
Регулировка под рост	160-180 см	160-180 см
Сиденье	Нет	Нет
Колеса	Нет	Да
Размеры (Ш x Г x В)	60 x 50 x 80-95 см	60 x 50 x 80-95 см
Максимальная нагрузка	135 кг	135 кг
Вес	2,7 кг	2,9 кг
Гарантия	6 месяцев	6 месяцев
Бренд	Barry	Barry
Страна производства	Китай	Китай

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, руководство по эксплуатации.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на 135 кг.

2.2 Порядок работы

Ходунки продаются в разобранном виде.

1. Вытащите изделие из коробки.

2. Поверните обе стороны ходунков, пока не услышите характерный щелчок.

3. Отрегулируйте высоту ходунков. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте. Медные фиксирующие шарики должны полностью выскочить из отверстий.

4. Чтобы сложить ходунки, необходимо нажать на фиксирующий замок и повернуть обе стороны ходунков внутрь.

Расположите ходунки на желаемой дистанции от вас. Используя свои руки как опоры, подойдите ближе к раме ходунков. Не подходите слишком близко к передней раме ходунков, это может нарушить равновесие. Медленно передвигайтесь вперед мелкими шагами.

Чтобы сесть, отодвиньтесь назад, пока ваши ноги не коснутся сиденья. Одной рукой нащупайте сиденье, а другой держитесь за ходунки.

Чтобы встать из положения сидя, оттолкнитесь руками от сиденья и затем возьмитесь за ходунки.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки 10180, 10180-W.

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

РУ от 21.06.2011 №ФСЗ 2011/09870

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru